



Производитель: «Назалезе Лтд.», Великобритания.
Nasaleze LTD, Unit 6, The Shipyard, Ramsey, Isle of Man, IM8 3DT, UK.

Держатель РУ: «Замбон С.п.А.», Италия. Zambon S.P.A., Bresso (MI) Via Lillo del Duca, 10-20091, Italy.

Дистрибьютор в России: ООО «Замбон Фарма», 119002, Москва, Глазовский пер., д.7.

Тел.: + 7 (495) 933-38-30/32, факс: +7 (495) 933-38-31

ИНСТРУКЦИЯ
по применению медицинского изделия
отоларингологическое барьерное средство (фильтр)

Назаваль® ПЛЮС

Наименование медицинского изделия:

Отоларингологическое барьерное средство (фильтр) **Назаваль® ПЛЮС**

Регистрационный номер: ФСЗ 2009/04743 от 18.03.2013 г.

Состав: микронизированная целлюлоза растительного происхождения, экстракт дикого чеснока.

Вспомогательные вещества: экстракт натуральной перечной мяты.

Описание: мелкодисперсный порошок белого цвета или почти белого цвета с легким запахом мяты, по 500 мг во флаконе из полиэтилена с патентованным дозатором и навинчивающимся колпачком. 1 флакон вместе с инструкцией по применению помещен в пачку картонную.

НАЗНАЧЕНИЕ:

Назаваль® ПЛЮС действует как естественный барьер на слизистой носа и используется для защиты от проникновения вирусов и бактерий, попадающих в верхние дыхательные пути при вдыхании воздуха. Является профилактическим средством от ОРВИ (в том числе гриппа) и других простудных заболеваний.

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ:

Порошок целлюлозы и экстракта дикого чеснока из дозатора попадает на слизистую полости носа и образует прозрачный, гелеобразный, защитный слой, не мешающий дыханию. Гелеобразный слой является эффективным барьером против вирусов и бактерий, защищая организм от простудных заболеваний и ОРВИ. Благодаря своим антисептическим свойствам, экстракт дикого чеснока подавляет рост и нейтрализует бактерии и вирусы, попадающие на слизистую носа с вдыхаемым воздухом.

Спрей назальный, дозированный **Назаваль® ПЛЮС** является барьерным средством, не оказывает системного и местного действия.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

Назаваль® ПЛЮС применяется для профилактики простудных заболеваний, ОРВИ (в том числе гриппа).

- однократно: перед возможным контактом с больным ОРВИ, при посещении мест массового скопления людей в качестве средства экстренной защиты.
- ежедневно: в период сезона заболеваемости ОРВИ.

Назаваль® ПЛЮС может применяться у детей и взрослых, а также женщин в период беременности и кормления грудью.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Индивидуальная непереносимость компонентов.

Аллергические реакции на чеснок.

Склонность к носовым кровотечениям.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ:

Детям и взрослым: по одному впрыскиванию в каждый носовой ход 3–4 раза в день (через каждые 5–6 часов). Как правило, такой частоты применения достаточно для защиты в течение дня. При необходимости, **Назаваль® ПЛЮС** может быть использован так часто, как это необходимо.

Рекомендуется использовать **Назаваль® ПЛЮС** за 10–15 минут перед предполагаемыми поездками в общественном транспорте (самолете, поездах и т. д.), при посещении мест массового скопления людей.



ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ:

- 1 При первом использовании сделайте 2 пробных нажатия на стенки флакона в воздух — вы увидите струйку порошка.
- 2 Перед применением, при необходимости, проведите гигиеническую очистку полости носа.
- 3 Держите голову прямо, нет необходимости ее запрокидывать.
- 4 Встряхните флакон.
- 5 Зажмите пальцем один носовой ход.
- 6 Поместите носик флакона в противоположный носовой ход и, интенсивно нажав на стенки флакона, сделайте одно впрыскивание порошка на вдохе.
- 7 Встряхните флакон и повторите такую же процедуру с противоположной стороны.

Рекомендуется использовать повторно после каждого очищения носовой полости для возобновления защитного слоя.

БЕРЕМЕННОСТЬ И ЛАКТАЦИЯ:

Назаваль® ПЛЮС может применяться во время беременности и в период кормления грудью, поскольку он не обладает системным действием и не содержит консервантов.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Безопасность **Назаваль® ПЛЮС** обусловлена отсутствием взаимодействия с органами и тканями организма.

Назаваль® ПЛЮС у детей следует применять под наблюдением взрослых.

Перед каждым применением рекомендуется проводить гигиеническую очистку носовой полости. Следует избегать контакта носика флакона со слизистой носа. Это может привести к закупориванию носика флакона порошком. Если такое все же случилось, прочистите носик флакона тонким острым предметом (иголкой, зубочисткой).

При необходимости совместного применения с другими назальными лекарственными средствами **Назаваль® ПЛЮС** следует использовать не ранее, чем через 30 минут после их применения, предварительно очистив носовые ходы. Не рекомендуется использовать **Назаваль® ПЛЮС** после применения назальных мазей и назальных капель на масляной основе.

Применение барьерного средства **Назаваль® ПЛЮС** не влияет на способность к управлению транспортными средствами, не вызывает сонливости.

При попадании средства **Назаваль® ПЛЮС** в глаза рекомендуется промыть их водой.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

Срок годности — 3 года.

Не использовать при повреждении флакона.

Хранить в сухом месте при комнатной температуре. Хранить в местах, недоступных для детей! Флакон рекомендуется использовать в течение 6 месяцев после первого вскрытия.

Не использовать по истечению срока годности, указанного на упаковке.

Допускается транспортировка всеми видами транспортных средств, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Условия отпуска из аптек:

Отпускается без рецепта врача.